



SUELO

mm  
MANACA  
MEDICAL

PAD75100, PAD75180 Y PAD90200

## GEKO ANTISKID

Tapete antideslizante que recoge sangre, fluidos de irrigación, orina, agua y otro tipo de líquidos presentes en cirugías.



**GEKO**  
Antiskid

### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Compuesto de 2 capas: Una primera capa de tejido no tejido de airlaid absorbente blanco y una segunda capa de polietileno azul anti deslizante con una película de PE mate.
- ✓ Con 4 adhesivos de doble cara que no dejan residuo y se retiran fácilmente.
- ✓ No desliza ni en húmedo ni en seco.
- ✓ Absorbente de 2 l/m<sup>3</sup> a 4 l/m<sup>3</sup>.
- ✓ Previene caídas en el entorno quirúrgico.
- ✓ Reduce tiempos y recursos de limpieza.
- ✓ De fácil y rápida colocación.
- ✓ Disposición final sencilla y económica.
- ✓ Producto desechable, de un solo uso.





# SUELO

**mm**  
MANACA  
MEDICAL

PAD75100, PAD75180 Y PAD90200

## GEKO ANTISKID

REF.	MEDIDA	ABSORCIÓN m <sup>2</sup>	ABSORCIÓN TOTAL	PESO UNIDAD
PAD75100	75X100 cm	2.0 litros / m <sup>2</sup>	1.50 litros	150 gramos
PAD75180	75X180 cm	2.0 litros / m <sup>2</sup>	2.70 litros	260 gramos
PAD90200	90X200 cm	2.0 litros / m <sup>2</sup>	3.60 litros	380 gramos

## PRESENTACIÓN

REF.	CAJA	UNIDADES/CAJA	PESO CAJA
PAD75100	101x77X13 cm	75	14 kg
PAD75180	77x92X25 cm	50	19 kg
PAD90200	92x52X15 cm	40	17 kg

## CONFORMIDAD

Producto sanitario Clase I no estéril. Según Reglamento (UE) 2017/745 . Libre de látex.

## USO E INDICACIONES DE USO

- Alfombras desechables, de un solo uso.
- Quirófano. Lavamanos quirúrgicos y centrales de esterilización.
- Paño absorbente para recolectar fluidos, el polietileno azul antideslizante mate en contacto con el suelo, el airlaid blanco absorbente hacia arriba.
- Tras la colocación se puede caminar encima o que pasen carritos, el producto puede ser cortado.
- El tapete no retiene el líquido, este necesita ser doblado antes de levantarse para limitar las fugas de fluido al desecharse.



UN SOLO USO



LIBRE DE LÁTEX



NO ESTÉRIL